

## სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციები STI - PCR

### მასალის აღების წესი

**კვლევა:** სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციები STI (დიდი პანელი)

- *Chlamydia trachomatis*
- *Neisseria gonorrhoeae*
- *Trichomonas vaginalis*
- *Mycoplasma hominis*
- *Mycoplasma genitalium*
- *Ureaplasma urealyticum*
- *Treponema pallidum*
- *Herpes simplex virus 1*
- *Herpes simplex virus 2*
- *Haemophilus ducreyi*

**კონტენერი:** სატრანსპორტო მედიუმი - ENat Transport tube, LMS-Swab Amies.



### მასალა: ცერვიკალური ნაცხი

მასალის აღებამდე ნეიტრალური ჩხირის საშუალებით საშვილოსნოს ყელის ზედაპიროდან ფრთხილად მოაცილეთ ზედმეტი ლორწო (ეს ჩხირი გადააგდეთ).

### მასალის აღება:

- მოახდინეთ კონტეინერზე მარკირება წინასწარ;
- ამოიღეთ მასალის ასაღები ჩხირი კონტეინერიდან;
- მოათავსეთ ჩხირი ენდოცერვიქსში და წრიული მოძრევით აიღეთ ნაცხი;
- მოათავსეთ ჩხირი კონტეინერში;
- გამოაგზავნეთ კონტეინერი ლაბორატორიაში კვლევისთვის.

- მასალა სტაბილურია: 2 საათი 15-30 °C; 24 საათი 2-8 °C